


OMRON

CS2 Kisméretű mandzsetta (HEM-CS24)

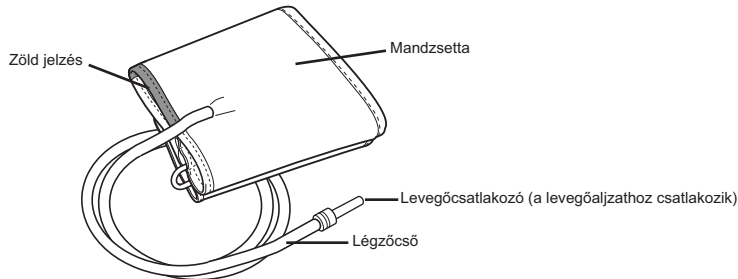

i A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kérjük, tartsa meg későbbi tájékozódás céljából.

Használati útmutató

Kisméretű mandzsetta használati utasítása

Köszönjük, hogy az OMRON kisméretű mandzsettát vásárolta meg. Ezzel a mandzsettával használható karátmérő 17 - 22 centiméter. Az OMRON kisméretű mandzsetta számos OMRON vérnyomásmérőhöz csatlakoztatható. Kérjük, tekintse meg a vérnyomásmérő felhasználói kézikönyvét.

A használható csatlakozóval kapcsolatosan ellenőrizze az aktuális terméket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a két csatlakozó nagyon hasonlít egymásra, a megfelelő levegőcsatlakozót csatlakoztassa a levegőtömlőhöz. Ha nem a megfelelő csatlakozót csatlakoztatja, a levegő elszívárogthat és a mérések pontatlanná válhatnak.

A mandzsetta felhelyezése

1. Helyezze bal karját a mandzsettába.

Megjegyzés: Ha a mandzsetta nincs összeszerelve, a hurok létrehozása érdekében vezesse át a tömlőtől legtávolabb eső mandzsettavéget a D-gyűrűn keresztül. A puha szövetrésznek a mandzsettahurok belső részén kell lennie.

2. Helyezze el megfelelően a kart.

- 1) A levegőtömlőnek a felkar belsején kell végighaladnia, és egy vonalban kell lennie a középső ujjával.
- 2) A mandzsetta alsó részének körülbelül 1 - 2 cm-rel a könyök felett kell lennie.
- 3) Helyezze a mandzsettát a felkarjára, hogy a jelölés (a tömlő alatti nyíl) a kar belső oldalának közepén legyen, és annak mentén lefelé mutasson.



Vérnyomásmérés a jobb karon

Helyezze fel úgy a mandzsettát, hogy a levegőtömlő könyökének oldalához kerüljön.

- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a karját a levegőtömlőre, és más módon se korlátozza a levegő útját a mandzsettához.
- A mandzsettának körülbelül 1 - 2 cm-rel a könyök felett kell lennie.

3. A mandzsetta megfelelő elhelyezése után zárja le SZOROSAN a mandzsettát.

Tippek

- Ne tegye a mandzsettát vastag ruhadarabokra, és ne hajtsa fel az ing ujját, ha nagyon szoros.
- Helyezze a mandzsettát szívmagasságba (mellmagasságba). Szükség esetén használjon párnát.

Karbantartás

- A mandzsettáról a szennyeződések nedves ronggyal és szappanos vízzel távolíthatók el.
A mandzsettát ne mossa el, és ne nedvesítse meg!

- Ne hajtsa össze túl szorosan a mandzsettát vagy a levegőtömlőt, és ne nyomja össze őket.
- Ne tárolja a mandzsettát a következő helyzetekben:
 - Ha a mandzsetta nedves.
 - Magas hőmérsékletnek, páratartalomnak, közvetlen napsütésnek, pornak vagy korrodáló gőzöknek kitett helyen.
 - Rezsésnek, ütésnek kitett helyen, vagy lejtős felületen.



A mandzsetta megfelel a 93/42/EGK EK direktíva (Orvostechikai eszközök direktíva) rendelkezéseinek.

Gyártó 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÁN
EU-képviselő 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com
Termékképviselő	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kína
Leányvállalatok	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.co.uk
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NÉMETORSZÁG www.omron-healthcare.de
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIAORSZÁG www.omron-healthcare.fr

Származási ország: Kína

Ez az OMRON termék az OMRON Healthcare Co. Ltd., Japán székhelyű vállalat szigorú minőségbiztosítási rendszerét követve került tervezésre és gyártásra.

IM-HEM-CS24-E-04-07/2014